

Calcisole™

Паста гидроксидкальцевая регенерирующая для корневых каналов

Назначение

Calcisole-C предназначен к применению в терапевтической стоматологии для временного пломбирования корневых каналов зуба в том случае, если развитие корневой части зуба не завершено, лечения при перфорациях и трещинах, непрямого покрытия пульпы при лечении глубокого кариеса, прямого покрытия пульпы зуба в случае ее обнажения или при использовании метода витальной ампутации.

Состав и свойства

Calcisole-C представляет собой готовую к применению пасту белого цвета, приготовленную на водной основе. Высокое содержание гидроокиси кальция (42 %) создает повышенную щелочную реакцию (до pH 12), стимулируются регенерационные процессы в тканях зуба, стабилизируется жизнеспособность зуба и оказывается антимикробное действие. **Calcisole-C** активно помогает воотановлению пульпы и способствует формированию вторичного дентина. Паста рентгеноконтрастна.

Способ применения

Перед наложением **Calcisole-C** подготовленную кариозную полость высушивают тампоном. Наносят **Calcisole-C** послойно до желаемой толщины. Дают просохнуть каждому слою или осторожно высушивают струей воздуха. Не следует применять **Calcisole-C** у самых краев кариозной полости, в противном случае удалите прилипшую к ним пасту. Затем ставят подкладку и пломбу. При пломбировании корневых каналов, прежде всего проводят их механическую и химическую обработку (1 % раствор перекиси водорода или гипохлорита натрия), вводят пасту соответствующим инструментом, а затем ставят пломбу. После этого проводят рентгенологический контроль качества пломбирования канала. Если пломбировочный материал выведен за верхушку корня, это может вызвать дискомфорт (чувствительность при накусывании или припухлость). Как правило, эти явления исчезают в течение 24 - 48 часов.

Условия хранения и маркировка

Условия хранения

Calcisole-C в упакованном виде должен храниться в закрытых прохладных помещениях, защищенных от воздействия атмосферных осадков и прямых солнечных лучей, на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. Для увеличения срока годности при длительном хранении рекомендуется использовать холодильник с температурой +5°C.

Маркировка

Символ  указывает рекомендуемый конечный срок использования изделия.

Символ CP в таблице указывает номер свидетельства о государственной регистрации и дату его выдачи.

ЧП "Латус"
61010, г. Харьков, ул. Текстильная, 82, Тел. +380577332697
www.latus.com.ua

Calcisole™

Паста гидроксидкальцієва регенеруюча для корневих каналів

Призначення

Calcisole-C призначений до застосування у терапевтичній стоматології для тимчасового пломбування корневих каналів зуба у тому випадку, якщо розвиток кореневої частини зуба не завершено, лікування при перфораціях та тріщинах, непрямого покриття пульпи при лікуванні глибокого карієсу, прямого покриття пульпи зуба у випадку її оголення або при застосуванні методу вітальної ампутації.

Склад та властивості

Calcisole-C представляє собою готову до застосування пасту білого кольору, приготовану на водній основі.

Високий вміст гідроксиду кальцію (42 %) утворює підвищену лужну реакцію (до pH 12), стимулюються регенераційні процеси в тканинах зуба, стабілізується життєдіяльність зуба та чиниться антимікробна дія. **Calcisole-C** активно допомагає відновленню пульпи і сприяє формуванню вторинного дентина. Паста рентгеноконтрастна.

Спосіб застосування

Перед накладанням **Calcisole-C** підготовлену кариозну порожнину висушують тампоном. Наносять **Calcisole-C** пошарово до бажаної товщини. Дають просохнути кожному шару або обережно висушують струменем повітря. Не слід використовувати **Calcisole-C** біля самих країв кариозної порожнини, у противному разі видалити прилипли до них пасту. Потім ставлять підкладку і пломбу. При пломбуванні корневих каналів, перш за все проводять їх механічну та хімічну обробку (1% розчином перекису водню або гіпохлориту натрію), вводять пасту відповідним інструментом, а потім ставлять пломбу. Після цього проводять рентгенологічний контроль якості пломбування каналу. Якщо пломбувальний матеріал виведений за верхівку кореня, це може викликати дискомфорт (чутливість при накусюванні або припухлість). Як правило, ці явища зникають протягом 24 - 48 годин.

Умови зберігання і маркування

Умови зберігання

Calcisole-C в упакованому вигляді повинен зберігатися в закритих прохолодних приміщеннях, захищених від дії атмосферних опадів і прямих сонячних променів, на відстані не менш, як 1 м від опалювальних приладів. Для збільшення терміну придатності при тривалому зберіганні рекомендується використовувати холодильник з температурою +5°C.

Маркування

Символ  вказує рекомендуєми кінцевий термін використання виробу.

Символ CP в таблиці зазначає номер свідоцтва про державну реєстрацію і дату його видачі.

ПП "Латус"
61010, м. Харків, вул. Текстильна, 82, Тел. +380577332697
www.latus.com.ua