

Инструкция по применению

Редакция 06.2014

Devilat™

Паста безмышьяковистая для девитализации пульпы зуба

Назначение

Паста **Devilat** предназначена для девитализации пульпы при лечении пульпита методом мортальной экстирпации или ампутации, для лечения остаточного корневого пульпита временных и постоянных зубов, а также как дополнительное средство для девитализации при повторной процедуре после применения паст, содержащих мышьяк.

Состав и свойства

Входящие в состав пасты **Devilat** параформальдегид и лидокаина гидрохлорид позволяют обеспечить пролонгированную девитализацию пульпы практически без раздражения и боли, а также исключают необходимость дополнительной обработки каналов с целью нейтрализации солей мышьяка как в случае применения мышьяковистых паст.

Способ применения

Необходимое количество пасты **Devilat** с помощью зонда (без давления) ввести в предварительно очищенную от кариозного дентина и раскрытую полость. Количество пасты определяется индивидуально. При лечении пульпита молочных зубов, а также однокорневых зубов у взрослых достаточно нанести пасту в количестве равном размеру просяного зерна. Для девитализации пульпы многокорневых зубов количество пасты необходимо удвоить. После наложения пасты **Devilat** необходимо герметично закрыть полость временным пломбирочным материалом **Tempolat**. Полная девитализация пульпы проис-

ходит за 3-5 дней. Если пациент не ощущает боли, постоянное пломбирование можно проводить уже через 24-48 часов после применения пасты. При недостижении прямого контакта с пульпой девитализацию нужно проводить в два этапа. Прямой контакт может быть достигнут лишь на втором этапе после снижения жизнеспособности пульпы. После девитализации и экстирпации пульпы необходима инструментальная и медикаментозная обработка канала.

При усилении пульпитной боли после наложения пасты **Devilat** (не вскрыт рог пульпы или паста наложена очень плотно) необходимо выполнить инфльтрационную анестезию лидокаином.

Условия хранения и маркировка

Условия хранения

Devilat в упакованном виде должен храниться в закрытых прохладных помещениях, защищенных от воздействия атмосферных осадков и прямых солнечных лучей, на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов.

Маркировка

Символ  указывает рекомендуемый конечный срок использования материала.

Символ **СР** в таблице обозначает номер свидетельства о государственной регистрации и дату его выдачи.

ЧП "Латус"

61010, г. Харьков, ул. Текстильная, 82,
Тел. +380577332697
www.latus.com.ua



Інструкція по застосуванню

Редакція 06.2014

Devilat™

Паста безарсенова для девіталізації пульпи зубу

Призначення

Паста **Devilat** призначена для девіталізації пульпи при лікуванні пульпіту методом моральної екстирпації або ампутації, для лікування залишкового кореневого пульпіту тимчасових і постійних зубів, а також як додатковий засіб для девіталізації при повторній процедурі після застосування паст, що містять арсен.

Склад і властивості

Параформальдегід і лідокаїну гідрохлорид, які входять до складу паст **Devilat** дозволяють забезпечити пролонговану девіталізацію пульпи практично без роздратування і болю, а також виключають необхідність додаткової обробки каналів з метою нейтралізації солей арсену як у разі застосування арсенових паст.

Спосіб застосування

Необхідну кількість паст **Devilat** за допомогою зонда (без тиску) вводять в заздалегідь очищену від каріозного дентину і розкриту порожнину. Кількість паст визначається індивідуально. При лікуванні пульпіту молочних зубів, а також однокорневих зубів у дорослих досить нанести пасту в кількості рівному розміру просяного зерна. Для девіталізації пульпи багатокорневих зубів кількість паст необхідно подвоїти. Після накладення паст **Devilat** необхідно герметично закрити порожнину тимчасовим пломбувальним матеріалом **Tempolat**. Повна девіталізація пульпи

відбувається за 3-5 днів. Якщо пацієнт не відчуває болю, постійне пломбування можна проводити вже через 24-48 годин після застосування паст. При недосягненні прямого контакту з пульпою девіталізацію потрібно проводити в два етапи. Прямий контакт може бути досягнутий лише на другому етапі після зниження життєздатності пульпи. Після девіталізації і екстирпації пульпи необхідна інструментальна і медикаментозна обробка каналу. При посиленні пульпітного болю після накладення паст **Devilat** (не розкритий ріг пульпи або паста накладена дуже щільно) необхідно виконати інфільтраційну анестезію лідокаїном.

Умови зберігання та маркування

Умови зберігання

Devilat в упакованому вигляді повинен зберігатися в закритих прохолодних приміщеннях, захищених від дії атмосферних опадів і прямих сонячних променів, на відстані не менш, як 1 м від опалювальних приладів.

Маркування

Символ  вказує на рекомендує кінцевий термін використання виробу. Символ **CP** у таблиці позначає номер свідоцтва про державну реєстрацію та дату його видачі.

ПП "Латус"

61010, м.Харків, вул. Текстильна, 82,

Тел. +380577332697

www.latus.com.ua

