

Latacryl-L™

Матеріал поліметакрилатний стоматологічний підкладковий

Призначення

Latacryl-L призначений до застосування в стоматологічній практиці для виготовлення м'яких підкладок в часткових та повних зубних протезах.

Склад і властивості

Latacryl-L представляє собою акрилову композицію, що готується безпосередньо перед застосуванням з тонкодисперсного забарвленого у відтінки рожевого кольору порошку суспензійного поліетилметакрилату і рідини, яка не містить метилметакрилат.

Latacryl-L забезпечує швидке виготовлення підкладки протезу, добре з'єднається з базисом протезу, майже не має смаку та запаху, полупрозорий, біологічно нейтральний.

Latacryl-L виготовляють у вигляді вологої клейкої маси при співвідношенні 1,5 г порошку на 1,0 г рідини. Робочий час маси 5 хвилин.

До комплекту матеріалу **Latacryl-L** входить також захисний лак.

Спосіб застосування

Виготовити підкладку в лабораторії можна двома способами: у кюветі і на моделі.

Приготування формувальної маси

У поліетиленовий, фарфоровий або скляний стаканчик дозують необхідну кількість рідини, потім невеликою струминкою присипають полімерний порошок. Для досягнення однорідної консистенції масу перемішують шпателем.

Виготовлення підкладки у кюветі

Після зняття функціонального зліпка силіконовою масою типу **Consiflex** тип 3 на протезі, відливають гіпсову модель. Потім приступають до гипсовки моделі в кювету зворотним способом. Після твердіння гіпсу кювету розкривають рычагообразним рухом ножа, прибирають силіконову масу і роблять матовою слизову частину протезу, промивають, висушують, протирають мономером місця, на які буде поміщена маса **Latacryl-L**. Гіпсову модель, що знаходиться в контркуюеті, ізолюють лаком **Algoplen** №2. Приготовану масу **Latacryl-L** накладають на підготовлену поверхню протезу і на ізольовану модель, рівномірно розподіляючи її по поверхні.

Сполучають обидві половини кювети, поміщають їх в зуботехнічний прес і повільно пресують; закріплюють в бюгель і приступають до полімеризації.

Виготовлення підкладки на моделі

Після зняття функціонального зліпку силіконовою масою типу **Consiflex** тип 3 на протезі, відливають гіпсову модель. Для фіксації прикусу необхідно на виготовленій моделі отримати силіконові блоки, використовуючи **Consiflex** тип 0. Поверхню слизової частини протезу роблять матовою, промивають, висушують, протирають мономером місця, на які буде поміщена маса **Latacryl-L**. Ізоляцію гіпсової моделі виконують лаком **Algoplen** №2. Готують і накладають приготовану масу **Latacryl-L**. Поміщають протез на модель і фіксують за допомогою блоку. Скальпелем видаляють надлишки матеріалу.

Заклучна обробка

Кювету, закріплену в бюгелі (або протез на моделі) укладають в полімеризатор у воду при температурі 65 °С, на 30 хвилин під тиском у 2 бара. Після витримки протез обробляють та полірують традиційним способом. Після цього наносять за допомогою пензлику шар лаку на всю поверхню м'якої підкладки. Поверхню в місцях з'єднання протезу з м'якою підкладкою покривають лаком кілька разів. Через 2 хвилини дію повторити.

Через 15 хвилин протез можна віддавати пацієнту.

Умови зберігання та маркування

Умови зберігання

Latacryl-L слід зберігати в темному провітрюваному приміщенні.

Маркування

Символ  зазначає рекомендуєий кінцевий термін використання виробу.

Символ **CP** у таблиці позначає номер свідоцтва про державну реєстрацію та дату його видачі.

ПП "Латус",
61010, м. Харків, вул. Текстильна, 82,
Тел. +380577332697 www.latus.com.ua

LaTuS

Latacryl-L™

Материал полиметакрилатный стоматологический подкладочный

Назначение

Latacryl-L предназначен к применению в стоматологической практике для изготовления мягких подкладок в частичных и полных зубных протезах.

Состав и свойства

Latacryl-L представляет собой композицию, которая готовится непосредственно перед применением из тонкодисперсного окрашенного в оттенок розового цвета порошка суспензионного полиэтилметакрилата и жидкости, не содержащей метилметакрилата.

Latacryl-L обеспечивает быстрое изготовление подкладки протеза, хорошо соединяется с базисом протеза, почти не имеет вкуса и запаха, полупрозрачный, биологически нейтрален.

Latacryl-L готовят в виде влажной клейкой массы при соотношении 1,5 г порошка на 1,0 г жидкости. Рабочее время массы 5 мин.

В комплект материала **Latacryl-L** входит также защитный лак.

Способ применения

Изготовить подкладку в лаборатории можно двумя способами: в кювете и на модели.

Приготовление формовочной массы

В полиэтиленовый, фарфоровый или стеклянный стаканчик дозируют необходимое количество жидкости, затем небольшой струйкой присыпают полимерный порошок. Для достижения однородной консистенции массу перемешивают шпателем.

Изготовление подкладки в кювете

После снятия функционального слепка силиконовой массой типа **Consiflex** тип 3 на протезе, отливают гипсовую модель. Затем приступают к гипсовке модели в кювету обратным способом. После затвердевания гипса кювету раскрывают рычагообразным движением ножа, убирают силиконовую массу и делают матовой слезистую часть протеза, промывают, высушивают, протирают мономером места, на которые будет помещена масса **Latacryl-L**. Гипсовую модель, находящуюся в контркювете, изолируют лаком **Algoplen** №2. Приготовленную массу **Latacryl-L** накладывают на подготовленную поверхность протеза и на изолированную модель, равномерно

распределяя ее по поверхности. Соединяют обе половины кюветы, помещают их в зуботехнический пресс и медленно прессуют; закрепляют в бюгель и приступают к полимеризации.

Изготовление подкладки на модели

После снятия функционального слепка силиконовой массой типа **Consiflex** тип 3 на протезе, отливают гипсовую модель. Для фиксации прикуса необходимо на изготовленной модели получить силиконовые блоки, используя **Consiflex** тип 0. Поверхность слезистой части протеза делают матовой, промывают, высушивают, протирают мономером места, на которые будет помещена масса **Latacryl-L**. Изоляцию гипсовой модели выполняют лаком **Algoplen** №2. Готовят и накладывают приготовленную массу **Latacryl-L**. Помещают протез на модель и фиксируют при помощи блока. Скальпелем удаляют излишки материала.

Окончательная обработка

Кювету, закрепленную в бюгеле (либо протез на модели), помещают в полимеризатор в воду при температуре 65°C, на 30 мин под давлением 2 бар. После выдержки протез обрабатывают и полируют традиционным способом. Затем наносят при помощи кисточки слой лака на всю поверхность мягкой подкладки. Поверхность в месте соединения протеза с мягкой подкладкой покрывают лаком несколько раз. Через 2 минуты действие повторить.

Через 15 минут протез можно отдать пациенту.

Условия хранения и маркировка

Условия хранения

Latacryl-L следует хранить в темном, проветриваемом помещении.

Маркировка

Символ  указывает рекомендуемый конечный срок использования изделия.

Символ **СР** в таблице обозначает номер свидетельства о государственной регистрации и дату его выдачи.

ЧП "Латус", 61010,
г. Харьков, ул. Текстильная, 82,
Тел. +380577332697 www.latus.com.ua