

Инструкция по применению

Tempolat-C™

Редакция 12.2013

Материал композиционный химического отверждения для изготовления временных коронок

Назначение

Tempolat-C предназначен к применению в ортопедической стоматологии для изготовления временных коронок и мостов, вкладок, накладок и покрытий.

Состав и свойства

Tempolat-C представляет собой композиционный материал химического отверждения типа паста-паста. В состав материала входят многофункциональные метакрилатные олигомеры и тонкодисперсный наполнитель. Оптимальная текучесть материала Tempolat-C обеспечивает удобство внесения в слепок. При смешивании основной и катализаторной паст в соотношении 1:1 (по объему) полученная смесь сохраняет рабочее время 3-4 минуты (при температуре 21°C).

Способ применения

Перед подготовкой фрагмента или моста изготавливают оттиск с помощью силиконового материала Consiflex. Высушивают подготовленные зубы и слегка смазывают вазелином или аналогичным средством для отделения фрагмента вместе с окружающей тканью, а также если есть, композитные фрагменты надстройки. Выдавливают из шприцов на блокнот для смешивания равные по объему количества основной и катализаторной паст, смешивают в течение 30 с. Заполняют слепок или пластиковую матрицу материалом Tempolat-C, нанося материал сначала на окклюзионные поверхности, затем в десневые области, немного перекрывая их. Устанавливают и фиксируют с легким нажимом на реставрируемые зубы, заполненный материалом Tempolat-C слепок или пластиковую матрицу. Время от начала смешивания до помещения конструкции в полость рта не должно превышать 3 минут. Через 5-6 минут от начала смешивания материала извлекают конструкцию из полости рта, при этом материал должен находиться в эластичном состоянии. Не ранее, чем через 7-10 минут после извлечения конструкции из ротовой полости, можно производить обработку и полировку коронки или моста.

Рекомендации

Для увеличения прочности провизорной реставрации убирают межзубные перегородки. В случае необходимости (при недостатке места) следует увеличить нужные участки, вырезая оттисковой материал. Для более легкого выведения из полости рта следует закрыть поднутрения. При отсутствии зуба или наличии промежутка в молярной области необходимо вырезать борозду для создания стабильной промежуточной части провизорной реставрации. Если необходимо, перед снятием оттиска закрыть место отсутствующего зуба пластмассовым из стандартного набора. Фиксировать искусственный зуб к соседним зубам с помощью воска.

Вместо оттиска можно применять лабораторно изготовленную каппу, колпачки для одиночных коронок, поликарбонатные коронки-заготовки. При необходимости нужно произвести притирку соответствующим инструментом.

Для закрепления конструкции можно использовать любой временный цемент.

Проверить окклюзию

Условия хранения и маркировка

Условия хранения

Tempolat-C в упакованном виде должен храниться в закрытых прохладных помещениях, защищенных от воздействия атмосферных осадков и прямых солнечных лучей. Для увеличения срока годности при длительном хранении рекомендуется использовать холодильник с температурой +5°C. Перед работой Tempolat-C необходимо выдержать не менее 2-3 часов при комнатной температуре для восстановления пластичности пасты.

Маркировка

Символ  указывает рекомендуемый конечный срок использования изделия. Символ **СР** в таблице обозначает номер свидетельства о государственной регистрации и дату его выдачи.

ЧП "Латус", 61010, г.Харьков, ул. Текстильная, 82,
Тел. +380577332697 www.latus.com.ua



Інструкція по застосуванню

Tempolat-C™

Редакція 12.2013

Матеріал композиційний хімічного твердіння для виготовлення тимчасових коронок

Призначення

Tempolat-C призначений до застосування в ортопедичній стоматології для виготовлення тимчасових коронок і мостів, вкладок, накладок і покриттів.

Склад та властивості

Tempolat-C є композиційним матеріалом хімічного твердіння типу паста-паста. До складу матеріалу входять багатофункціональні метакрилатні олігомери і тонкодисперсний наповнювач. Оптимальна текучість матеріалу Tempolat-C забезпечує зручність внесення до зліпку. При змішуванні основної і каталізаторної паст в співвідношенні 1:1 (за об'ємом) отримана суміш зберігає робочий час 3-4 хвилини (при температурі 21°C).

Спосіб застосування

Перед підготовкою фрагменту або мосту виготовляють відтиск за допомогою силіконового матеріалу Consiflex. Висушують підготовлені зуби і злегка змащують вазеліном або аналогічним засобом для відділення фрагменту разом з навколишньою тканиною, а також якщо є, композитні фрагменти надбудови. Видавлюють зі шприців на блокнот для змішування рівні по об'єму кількості основної та каталізаторної паст, змішують протягом 30 с.

Заповнюють зліпок або пластикову матрицю матеріалом Tempolat-C, завдаючи матеріал спочатку на оклюзійні поверхні, потім в ясенні області, трохи перекриваючи їх. Встановлюють і фіксують з легким натиском на зуби, що реставруються, заповнений матеріалом Tempolat-C зліпок або пластикову матрицю. Час від початку змішування до розміщення конструкції в ротовій порожнині не повинен перевищувати 3 хвилини. Через 5 - 6 хвилин від початку змішування матеріалу вилучають конструкцію із роової порожнини, при цьому матеріал повинен знаходитися в еластичному стані. Не раніше, чим через 7-10 хвилин після вилучення конструкції із ротової порожнини можна робити обробку і поліровку коронки або моста.

Рекомендації

Для збільшення міцності провізорної реставрації прибирають міжзубні перегородки. У разі потреби (при недоліку місця) слід збільшити потрібні ділянки, вирізуючи відтискний матеріал. Для легшого виведення з ротової порожнини слід закрити піднутрення. За відсутності зуба або наявності проміжку в молярної області необхідно вирізувати борозну для створення стабільної проміжної частини провізорної реставрації. Якщо необхідно, перед зняттям відтиску закрити місце відсутнього зуба пластмасовим із стандартного набору. Фіксувати штучний зуб до сусідніх зубів за допомогою воску. Замість відтиску можна застосовувати лабораторно виготовлену каплу, ковпачки для одиночних коронок, полікарбонатні коронки-заготовки.

При необхідності треба зробити притирання відповідним інструментом. Для закріплення конструкції можна використовувати будь-який тимчасовий цемент.

Перевірити оклюзію.

Умови зберігання та маркування

Умови зберігання

Tempolat-C в упакованому вигляді повинен зберігатися у закритих прохолодних приміщеннях, захищених від впливу атмосферних опадів та прямих сонячних променів. Для збільшення терміну придатності при тривалому зберіганні рекомендується використовувати холодильник з температурою +5°C. Перед роботою необхідно витримати Tempolat-C не менш, як 2-3 години при кімнатній температурі для відновлення пластичності паст.

Маркування

Символ  зазначає рекомендуємий кінцевий термін використання виробу.

Символ **CP** у таблиці позначає номер свідоцтва про державну реєстрацію і дату його видачі.

ПП "Латус", 61010, м. Харків, вул. Текстильна, 82,

Тел. +380577332697 www.latus.com.ua

