

Tempolat-F™

Паста для временной фиксации

Назначение

Паста Tempolat-F предназначена для временной фиксации коронок, мостов и других несъемных протезов.

Состав и свойства

Паста Tempolat-F приготовлена на основе цинк-сульфатного цемента, содержащий масляно-полимерный пастообразователь. Паста не имеет вкуса, хорошо переносится тканями зуба и деснами. Паста не содержит эвгенол.

Перед применением нет необходимости сушить культю и коронку, так как паста отверждается в присутствии влаги.

Применение

Tempolat-F вносят в коронку, фиксируют на культе зуба в течение 7-10 минут. Излишек пасты до отверждения удаляют ватным шариком. Отвержденный материал достаточно прочный и может использоваться для длительной временной фиксации,

при этом легко снимается, не травмируя твердые ткани культи зуба.

Условия хранения и маркировка

Условия хранения

Tempolat-F в упакованном виде должен храниться в закрытых прохладных помещениях, защищенных от попадания атмосферных осадков и прямых солнечных лучей, на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов.

Маркировка

Символ  указывает рекомендуемый конечный срок использования изделия.

ЧП "Латус"

61010, г. Харьков,

ул. Текстильная, 82,

Тел. +380577332697

www.latus.com.ua

Tempolat-F™

Паста для тимчасової фіксації

Призначення

Паста Tempolat-F призначена для тимчасової фіксації коронок, мостів і інших незнімних протезів.

Склад і властивості

Паста Tempolat-F приготована на основі цинк-сульфатного цементу, що містить масляно-полімерний пастоутворювач. Паста не має смаку, добре переноситься тканинами зуба і яснами. Паста не містить еugenol.

Перед застосуванням немає необхідності сушити культю і коронку, оскільки паста твердне у присутності вологи.

Спосіб застосування

Tempolat-F вносять до коронки, фіксують на культі зуба протягом 7-10 хвилин. Надлишок пасти до затвердіння видаляють ватяною кулькою. Затверділий матеріал досить міцний і може використовуватися для тривалої

тимчасової фіксації, при цьому легко знімається, не травмуючи тверді тканини культі зуба.

Умови зберігання і маркування

Умови зберігання

Tempolat-F в упакованому вигляді повинен зберігатися в закритих прохолодних приміщеннях, захищених від попадання атмосферних опадів і прямих сонячних променів, на відстані не менш, як 1 м від опалювальних приладів.

Маркування

Символ ☞ вказує рекомендуємий кінцевий термін використання виробу.

ПП "Латус"

61010, м. Харків, вул. Текстильна, 82,
Тел. +380577332697

www.latus.com.ua