

Инструкция по применению

Tempolat-LC™

Редакция 12.2013

Цемент композиционный временный светоотверждаемый

Назначение

Tempolat-LC предназначен к применению в терапевтической стоматологии для временного пломбирования и покрытия лекарственного препарата при лечении кариеса и некариозных поражений зубных тканей. Использование Tempolat-LC позволяет обеспечить высокую стойкость временной пломбы в течение всего срока ее применения и сократить время проведения лечебной процедуры.

Состав и свойства

Цемент Tempolat-LC представляет собой композиционный материал, отверждающийся при воздействии света с длиной волны 400 - 500 нм. Глубина отверждения цемента при засветке в течение 40 с галогеновой лампой мощностью 75 Вт составляет более 3 мм.

Паста цемента окрашена в универсальный светло-кремовый цвет (примерно В3 по шкале Vita), имеет высокую пластичность и формуемость, не липнет к инструменту и хорошо фиксируется в пломбируемой полости. Прочностные свойства отвержденного цемента позволяют обеспечивать как надежное закрытие полости, так и легкое удаление его после окончания лечебной процедуры.

Цемент приготовлен на основе олигоэфиракрилатного связующего с повышенной биосовместимостью. Содержание неорганического наполнителя в цементе составляет 77 масс.%. Цемент обладает хорошей водостойкостью и не подвержен дезинтеграции.

Способ применения

Полость препарируют, промывают и проводят запланированную лечебную процедуру (купирование воспалительного процесса,

депульпирование, пломбирование корневого канала и т.п.). При этом не следует применять лечебные средства, содержащие резорцин, эвгенол, гваякол, пентахлорфенол, метилсалицилат и препараты таннина. В случае применения водного или спиртового раствора лечебного препарата после внесения его в полость делают подсушку сжатым воздухом 15с.

После этого оставшуюся часть полости заполняют при помощи гладилки цементом, не производя фотополимеризации формируют прикус, например, через слой алюминиевой фольги или полипропиленовой пленки, удаляют фольгу и излишки материала. Полимеризацию пломбы осуществляют с расстояния 2 - 3 мм в течение 40 с. Для устранения слабой липкости после полимеризации необходимо протереть пломбу ватным тампоном, увлажненным спиртом.

Условия хранения и маркировка

Условия хранения

Tempolat-LC в упакованном виде должен храниться в закрытых прохладных помещениях, защищенных от воздействия атмосферных осадков и прямых солнечных лучей. Для увеличения срока годности при длительном хранении рекомендуется использовать холодильник с температурой +5°C. Перед работой Tempolat-LC необходимо выдержать не менее 2-3 часов при комнатной температуре для восстановления пластичности пасты.

Маркировка

Символ ☞ указывает рекомендуемый конечный срок использования изделия.

Символ СР в таблице обозначает номер свидетельства о государственной регистрации и дату его выдачи.

ЧП "Латус",
61010, г. Харьков, ул. Текстильная, 82,
Тел. +380577332697 www.latus.com.ua



Інструкція по застосуванню

Редакція 12.2013

Tempolat-LC™

Цемент композиційний тимчасовий світлотверднучий

Призначення

Tempolat-LC призначений до застосування в терапевтичній стоматології для тимчасового пломбування і покриття лікарського препарату при лікуванні карієсу і некаріозних поразок зубних тканин. Використання Tempolat-LC дозволяє забезпечити високу стійкість тимчасової пломби протягом всього терміну її вживання і скоротити час проведення лікувальної процедури.

Склад та властивості

Tempolat-LC є композиційним матеріалом, який твердне під впливом світла з довжиною хвилі 400 - 500 нм. Глибина твердіння цементу при засвітленні протягом 40 с галогеновою лампою потужністю 75 Вт складає більше 3 мм. Паста цементу забарвлена в універсальний світло-кремовий колір (приблизно В3 за шкалою Vita), має високу пластичність і формуємість, не липне до інструменту і добре фіксується в порожнині, яка пломбується.

Міцність затверділого цементу дозволяє забезпечувати як надійне закриття порожнини, так і легке видалення його після закінчення лікувальної процедури.

Цемент приготований на основі олігоєфіракрілатного сполучника має підвищену біосумісність. Вміст неорганічного наповнювача в цементі складає 77 мас.%. Цемент має високу водостійкість і не схильний до дезинтеграції.

Спосіб застосування

Порожнину препарують, промивають і проводять заплановану лікувальну процедуру (купірування запального процесу, депульпіювання, пломбування кореневого каналу і тому подібне). При

цьому не слід застосовувати лікувальні засоби, що містять резорцин, евгенол, гваякол, пентахлорфенол, метилсаліцилат і препарати таніну.

В разі застосування водного або спиртового розчину лікувального препарату, після внесення його до порожнини, роблять підсушку стисненим повітрям 15 с. Після цього частину порожнини, що залишилася, заповнюють за допомогою гладилки цементом, не здійснюючи фотополімеризації формують прикус, наприклад, через шар алюмінієвої фольги або поліпропіленової плівки, видаляють фольгу і надлишки матеріалу.

Полімеризацію пломби здійснюють з відстані 2 - 3 мм протягом 40 с. Для усунення слабкої липкості після полімеризації необхідно протерти пломбу ватяним тампоном, зволоженим спиртом.

Умови зберігання та маркування

Умови зберігання

Tempolat-LC в упакованому вигляді повинен зберігатися у закритих прохолодних приміщеннях, захищених від впливу атмосферних опадів та прямих сонячних променів. Для збільшення терміну придатності при тривалому зберіганні рекомендується використовувати холодильник з температурою +5°C. Перед роботою необхідно витримати Tempolat-LC не менш, як 2-3 години при кімнатній температурі для відновлення пластичності пасти.

Маркування

Символ  зазначає рекомендує кінцевий термін використання виробу.

Символ **CP** у таблиці позначає номер свідоцтва про державну реєстрацію і дату його видачі.

ПП "Латус",
61010, м. Харків, вул. Текстильна, 82,
Тел. +380577332697 www.latus.com.ua

