

Tempolat SC™

Водный дентин

Назначение

Tempolat-SC предназначен к применению в стоматологической практике для временного пломбирования при эндодонтическом лечении, покрытия лекарственных препаратов в кариозной полости, временной фиксации коронок и мостовидных протезов.

Состав и свойства

Tempolat-SC представляет собой белый порошок водозатворимого цемента на цинк-сульфатной основе. При смешивании с водой порошок Tempolat-SC образует подвижную пасту, которая в течение короткого времени (2-3 минуты) загустевает и твердеет. Tempolat-SC хорошо сцепляется с тканями зуба и практически не дает усадки. Цемент содержит бактерицидную добавку хинозол.

Способ применения

На стеклянную пластинку (лучше предварительно охлажденную) помещают небольшую порцию порошка (примерно 0,5 г) и рядом прикапывают 6 капель воды. В течение 15-20 с порошок 2-3 порциями добавляют к воде и сразу смешивают растирающими движениями шпателя до получения пасты. Слегка продув полость воздухом, при помощи гладилки

заполняют ее цементом. Далее пасту разглаживают влажным ватным тампончиком. Пломба отвердевает в течение примерно 3 минут. Еще 3-4 минуты необходимы для набора пломбой первичной твердости и водостойкости. Во время твердения пломбы нельзя ее поправлять или уплотнять, так как это может привести к разрушению цемента.

Условия хранения и маркировка

Условия хранения

Tempolat-SC в упакованном виде должен храниться в закрытых прохладных помещениях, защищенных от попадания атмосферных осадков и прямых солнечных лучей.

Маркировка

Символ  указывает рекомендуемый конечный срок использования изделия.

Символ **СР** в таблице обозначает номер свидетельства о государственной регистрации и дату его выдачи.

ЧП "Латус"

61010, г.Харьков, ул. Текстильная, 82,

Тел. +380577332697

www.latus.com.ua

Tempolat SC™

Водний дентин

Призначення

Tempolat-SC призначений до застосування в стоматологічній практиці для тимчасового пломбування при ендодонтичному лікуванні, покриття лікарських препаратів в каріозній порожнині, тимчасовій фіксації коронок і мостоподібних протезів.

Склад і властивості

Tempolat-SC представляє собою білий порошок цементу на цинк-сульфатній основі, що затворюється водою. При змішуванні з водою порошок Tempolat-SC утворює рухливу пасту, яка протягом короткого часу (2-3 хвилини) загусає і твердне. Tempolat-SC добре зчіплюється з тканинами зуба і практично не дає усадки. Цемент містить бактерицидну добавку хінозол.

Спосіб застосування

На скляну пластинку (краще заздалегідь охолоджену) поміщають невелику порцію порошку (приблизно 0,5 г) і поруч прикопують 6 крапель води. Протягом 15-20 с порошок 2-3 порціями додають до води і відразу змішують розтираючими рухами шпателя до отримання пасту. Злегка продувши порожнину повітрям, за допомогою гладилки

заповнюють її цементом. Далі пасту розгладжують вологим ватяним тампоном. Пломба твердне протягом приблизно 3 хвилин. Ще 3-4 хвилини необхідні для набору пломбою первинної твердості і водостійкості. Під час тверднення пломби не можна її поправляти або ущільнювати, оскільки це може привести до руйнування цементу.

Умови зберігання та маркування

Умови зберігання

Tempolat-SC в упакованому вигляді повинен зберігатися в закритих прохолодних приміщеннях, захищених від впливу атмосферних опадів і прямих сонячних променів.

Маркування

Символ  вказує рекомендує кінцевий термін використання виробу.

Символ **СР** у таблиці позначає номер свідоцтва про державну реєстрацію та дату його видачі.

ПП "Латус"

61010, м. Харків, вул. Текстильна, 82,

Тел. +380577332697

www.latus.com.ua