

Ahygrol™

Жидкость для обезжиривания и сушки

Назначение

Ahygrol предназначен для высушивания и обезжиривания полостей и каналов зуба перед пломбированием или культи зуба перед установкой несъемных протезов, а также для очистки поверхностей протеза от загрязнений перед фиксацией.

Состав и свойства

Ahygrol представляет собой смесь легколетучих органических растворителей, индиферентную к окружающим мягким тканям полости рта, не вызывающую болезненную реакцию при попадании на слизистую оболочку. Легко растворяется в воде. Время высыхания 10 с. **Ahygrol** содержит также добавку природного поверхностно-активного вещества, улучшающую смачиваемость, десорбцию воды и следов жировых загрязнений.

Применение жидкости **Ahygrol** позволяет быстро и качественно обезжирить и просушить поверхность зуба и протеза перед фиксацией.

Способ применения

Обезжиривание и высушивание выполняют после препаровки, промывки водой и сушки полости или культы зуба, внутренней поверхности несъемного зубного протеза. Ватным тампоном, пропитанным жидкостью **Ahygrol** или при помощи пипетки обрабатывают полость или поверхность зуба и зубной протез. После чего на обработанную поверхность направляют слабую струю сжатого воздуха, при помощи которой слой жидкости вытесняется на периферию поверхности, тем самым максимально удаляя воду и жировые загрязнения.

Внимание! **Ahygrol** является огнеопасной жидкостью. При работе с ней нельзя пользоваться открытым огнем или электронагревательными приборами с открытой спиралью.

Условия хранения и маркировка

Условия хранения

Хранить в прохладных помещениях, защищенных от попадания прямых солнечных лучей и атмосферных осадков, на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов.

Маркировка

Символ  указывает рекомендуемый конечный срок использования изделия. Символ СР в таблице обозначает номер свидетельства о государственной регистрации и дату его выдачи.

ЧП "Латус"
61010, г.Харьков, ул. Текстильная, 82,
Тел. +380577332697
www.latus.com.ua

Ahygrol™

Рідина для знежирення і сушки

Призначення

Ahygrol призначен для висушування та знежирення порожнин та каналів зубу перед пломбуванням або культі зубу перед установленням незнімних протезів, а також для очистки поверхонь протезу від забруднень перед фіксацією.

Склад та властивості

Ahygrol являє собою суміш легколетучих органічних розчинників, індиферентних до навколишніх м'яких тканин ротової порожнини, яка не викликає хворобливої реакції при попаданні на слизову оболонку. Легко розчиняється у воді. Час висихання 10 с. **Ahygrol** має у своєму складі також домішку природної поверхньо-активної речовини, яка покращує змочування, десорбцію води та слідів жирових забруднень.

Застосування рідини **Ahygrol** дозволяє швидко та якісно знежирити та просушити поверхню зубу та протезу перед фіксацією.

Спосіб застосування

Знежирення та висушування здійснюють після препаровки, промивки водою та сушки порожнини або культі зубу, усереднені поверхні незнімного зубного протезу. Ватним тампоном, який промочен рідиною **Ahygrol** або за допомогою піпетки обробляють порожнину або поверхню зубу та зубного протезу. Після чого на оброблену поверхню направляють слабку струю стислого повітря, за допомогою якого шар рідини витісняється на периферію поверхні, тим самим максимально видаляя воду та жирові забруднення.

Увага! **Ahygrol** є вогнебезпечною рідиною. При роботі з нею забороняється користуватися відкритим вогнем або електронагрівальними приладами з відкритою спіраллю.

Умови зберігання та маркування

Умови зберігання

Зберігати в прохолодних приміщеннях, захищених від попадання прямих сонячних променів та атмосферних опадів, на відстані не менш, як 1 м від опалювальних приладів.

Маркування

Символ  зазначає рекомендуємий кінцевий термін використання виробу. Символ СР в таблиці зазначає номер свідоцтва про державну реєстрацію і дату його видачі.

ПП "Латус"
61010, м.Харків, вул. Текстильна, 82,
Тел. +380577332697
www.latus.com.ua