

Назначение

Применяется в терапевтической стоматологии как гемостатическое средство при капиллярном кровотечении из десны, корневого канала при витальной экстирпации пульпы.

Свойства

Hemalat forte хорошо подходит для гемостаза и контроля за десневой жидкостью при фиксации непрямых адгезивных реставраций и лечения. За короткое время останавливает кровотечение, устраняет загрязнение, вызванное циркуляцией десневой жидкости, обеспечивая тем самым оптимальный бондинг.

Очень мягко воздействует на твердые и мягкие ткани. Хорошо смывается водой.

Способ применения

При капиллярном кровотечении из десны на тампон из стерильной ваты наносят **Hemalat forte** и смазывают кровоточащую поверхность до полной остановки кровотечения.

При кровотечении из корневого канала вносят **Hemalat forte** на ватной турунде или непосредственно в корневой канал. При этом также удаляются избыточные количества коагулировавшей крови, которые создают сгустки и вне капиллярных отверстий.

Чтобы коагулировавшая кровь не налипала на обрабатываемые ткани в процессе нанесения **Hemalat forte**, дополнительно распыляют воду с использованием слюноотсоса.

Затем **Hemalat forte** смывают водой, подсушивают десну струей воздуха и проводят необходимые манипуляции.

Условия хранения и маркировка

Условия хранения

Hemalat forte в упакованном виде должен храниться в закрытых прохладных помещениях, защищенных от воздействия атмосферных осадков и прямых солнечных лучей, на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов.

Маркировка

Символ  указывает рекомендуемый конечный срок использования материала.

Призначення

Застосовується у терапевтичній стоматології як гемостатичний засіб при капілярній кровотечі з ясни, кореневого каналу при вітальній екстирпації пульпи.

Властивості

Hemalat forte добре підходить для гемостазу та контролю за ясневою рідиною при фіксації непрямих адгезивних реставрацій і лікування. За короткий час зупиняє кровотечу, усуває забруднення, яке викликане циркуляцією ясневої рідини, забезпечуючи тим самим оптимальний бондинг.

Дуже м'яко впливає на тверді та м'які тканини. Добре змивається водою.

Спосіб застосування

При капілярній кровотечі із ясни на тампон із стерильної вати наносять **Hemalat forte** і змащують кровоточиву поверхню до повної зупинки кровотечі.

При кровотечі із кореневого каналу вносять **Hemalat forte** на ватній турунді або безпосередньо в кореневий канал. При цьому також видаляється надмірна кількість коагульованої крові, яка утворює згустки і поза капілярних отворів. Щоб коагульована кров не налипала на тканини, що обробляються, у процесі нанесення **Hemalat forte** додатково розпилюють воду з використанням слиновідсмоктувача.

Потім **Hemalat forte** змивають водою, підсушують ясну струменем повітря та проводять необхідні маніпуляції.

Умови зберігання та маркування

Умови зберігання

Hemalat forte в упакованому вигляді повинен зберігатися в закритих прохолодних приміщеннях, захищених від дії атмосферних опадів і прямих сонячних променів, на відстані не менш, як 1 м від опалювальних приладів.

Маркування

Символ  вказує рекомендований кінцевий термін використання виробу.