

Tempolat™

Дентин-паста

Назначение

Паста Tempolat™ предназначена для покрытия лекарственного препарата и временного пломбирования при лечении среднего и глубокого кариеса.

Состав и свойства

Паста приготовлена на основе цинк-сульфатного цемента (водный дентин), замешанного на масляно-полимерном пастообразователе. Паста затвердевает в полости зуба при воздействии влаги в течение 30 - 40 минут, хорошо сцепляется со стенками полости и обеспечивает герметичность благодаря некоторому расширению в процессе отвердевания.

Паста нетоксична, не имеет вкуса, хорошо переносится тканями зуба и деснами.

Паста не содержит эвгенол.

Применение

Пасту накладывают в полость с лекарственным препаратом при помощи гладилки (лучше слегка подогретой) поверх ватного тампона слоем толщиной 2-3 мм. До набора Tempolat™ достаточной твердости пациенту не рекомендуется принимать пищу примерно в течение 1 часа.

Отвердевший материал легко выводится из полости при помощи экскаватора или зонда. Остатки материала очищают легким проходом бором и смывают водой.

Рекомендации

После отбора пасты закрыть банку крышкой, проверив наличие уплотнительной прокладки.

Условия хранения и маркировка

Условия хранения

Tempolat™ в упакованном виде должен храниться в закрытых прохладных помещениях, защищенных от попадания атмосферных осадков и прямых солнечных лучей.

Маркировка

Символ  указывает рекомендуемый конечный срок использования изделия.

Символ **СР** в таблице обозначает номер свидетельства о государственной регистрации и дату его выдачи.

ЧП "Латус"
61010, г. Харьков, ул. Текстильная, 82,
Тел. +380577332697
www.latus.com.ua

Tempolat™

Дентин-паста

Призначення

Паста Tempolat™ призначена для покриття лікарського препарату і тимчасового пломбування при лікуванні середнього та глибокого карієсу.

Склад та властивості

Паста виготовлена на основі цинк-сульфатного цементу (водний дентин), замішаного на масляно-полімерному пастоутворювачі. Паста твердне в порожнині зуба під впливом вологи протягом 30 - 40 хвилин, добре зчіплюється із стінками порожнини та забезпечує герметичність завдяки деякому розширенню у процесі твердіння. Паста нетоксична, не має смаку, добре переноситься тканинами зуба і яснами.

Паста не містить евгенол.

Застосування

Пасту накладають в порожнину з лікарським препаратом за допомогою гладилки (краще трохи підігрітою) поверх ватного тампона шаром завтовшки 2-3 мм. До набору Tempolat™ достатньої твердості пацієнту не рекомендується приймати їжу приблизно протягом 1 години.

Затверділий матеріал легко виводиться із порожнини за допомогою екскаватора або зонда. Залишки матеріалу очищують легким проходом бором і змивають водою.

Рекомендації

Після відбору пасту закрити банку кришкою, перевірити наявність ущільнюючої прокладки.

Умови збереження та маркування

Умови збереження

Tempolat™ в упакованому вигляді повинен зберігатися в закритих прохолодних приміщеннях, захищених від впливу атмосферних опадів і прямих сонячних променів.

Маркування

Символ ☞ вказує рекомендуємий кінцевий термін використання виробу. Символ **СР** у таблиці зазначає номер свідоцтва про державну реєстрацію та дату його видачі.

ПП "Латус"
61010, м.Харьков, вул. Текстильная, 82,
Тел. +380577332697
www.latus.com.ua