

Ftorcalcit-E™

Сольова система для глибокого фторування емалі

Призначення

Ftorcalcit-E призначений до застосування в стоматологічній практиці для:

- десенсибілізації шийки зуба;
- локальної профілактики і лікування карієсу зубної емалі;
- мінерального запечатування фісур.

Склад і властивості

Комплект Ftorcalcit-E включає рідину №1 і рідину №2.

Склад рідини №1: фторсилікат магнію, фторсилікат міді, дистильована вода.

Склад рідини №2: вискодисперсний гідроокис кальцію, гідроокис міді, загусники, дистильована вода.

Послідовне нанесення рідини №1 і №2 Ftorcalcit-E забезпечує глибоке фторування зубної емалі або кісткового цементу шийки зуба. В наслідок реакції між компонентами рідин утворюється гель кремнієвої кислоти і розподілені у ньому кристали фториду кальцію, магнію і міді. Висока концентрація іонів фтору і міді забезпечує захист зуба від карієсогенних мікроорганізмів, стимулює регенерацію тканин пародонту.

Спосіб застосування

Десенсибілізація шийки зуба

Ділянку зуба, яка обробляється, очищають від зубного нальоту за допомогою круглої щітки пастою для клінічного чищення, промивають водою і просушують стисненим повітрям. Шийку зуба протягом 30 с рясно змочують ватним тампоном, просоченим рідиною №1 Ftorcalcit-E. Після цього, не роблячи проміжного полоскання, на шийку зуба наносять рідину №2 Ftorcalcit-E і через 30 с проводять полоскання. Процедуру повторюють ще 2 раз через 1-3 тижні. Надалі процедуру проводять 1-2 рази на рік.

Увага: Не допускати попадання рідин в очі!

Профілактика карієсу шляхом глибокого фторування

Зуби, очищають зубною щіткою, включаючи міжзубний простір. Просушують стисненим повітрям і обробляють поквадратно за допомогою тампона, змоченого рідиною №1 Ftorcalcit-E. Потім, не роблячи полоскання, наносять рідину №2 Ftorcalcit-E і через хвилину полощуть рот. Процедуру проводять 1-2 рази на рік.

Мінеральна герметизація фісур

Фісури заздалегідь очищають від м'якого нальоту, просушують стисненим повітрям і змочують препаратами, як вказано вище при профілактиці карієсу. Надалі процедуру повторюють 1 раз на рік, не змінюючи спосіб профілактики карієсу методом глибокого фторування.

Умови зберігання і маркування

Умови зберігання

Ftorcalcit-E в упакованому вигляді повинен зберігатися в закритих прохолодних приміщеннях, захищених від дії атмосферних опадів і прямих сонячних променів, на відстані не менш, як 1 м від опалювальних приладів.

Маркування

Символ  вказує рекомендує кінцевий термін використання виробу.

Символ **СР** в таблиці позначає номер свідоцтва про державну реєстрацію і дату його видачі.

ПП "Латус",

61010, м.Харків, вул. Текстильна, 82,

Тел. +380577332697 www.latus.com.ua



Ftorcalcit-E™

Солевая система для глубокого фторирования эмали

Назначение

Ftorcalcit-E предназначен к применению в стоматологической практике для:

- десенсibilизации шейки зуба;
- локальной профилактики и лечения кариеса зубной эмали;
- минерального запечатывания фиссур.

Состав и свойства

Комплект Ftorcalcit-E включает жидкость №1 и жидкость №2.

Состав жидкости №1: фторсиликат магния, фторсиликат меди, дистиллированная вода.

Состав жидкости №2: высокодисперсная гидроокись кальция, гидроокись меди, загустители, дистиллированная вода.

Последовательное нанесение жидкости №1 и №2 Ftorcalcit-E обеспечивает глубокое фторирование зубной эмали или костного цемента шейки зуба. В результате реакции между компонентами жидкостей образуется гель кремниевой кислоты и распределенные в нем кристаллики фторида кальция, магния и меди. Высокая концентрация ионов фтора и меди обеспечивает защиту зуба от кариесогенных микроорганизмов, стимулирует регенерацию тканей пародонта.

Способы применения

Десенсibilизация шейки зуба.

Обрабатываемый участок зуба очищают от зубного налета при помощи круглой щетки пастой для клинической чистки, промывают водой и просушивают сжатым воздухом. Шейку зуба в течение 30 с обильно смачивают ватным тампончиком, пропитанным жидкостью №1 Ftorcalcit-E. После этого, не производя промежуточного полоскания, на шейку зуба наносят жидкость №2 Ftorcalcit-E и через 30 с проводят полоскание. Процедуру повторяют еще 2 раза через 1-3 недели. В дальнейшем процедуру проводят 1-2 раза в год.

Внимание: Не допускать попадания жидкостей в глаза!

Профилактика кариеса путем глубокого фторирования.

Зубы очищают зубной щеткой, включая межзубное пространство. Просушивают сжатым воздухом и обрабатывают поквадратно с помощью тампона, смоченного жидкостью №1 Ftorcalcit-E. Затем, не делая полоскания, наносят жидкость №2 Ftorcalcit-E и через минуту полощут рот. Процедуру проводят 1-2 раза в год.

Минеральная герметизация фиссур.

Фиссуры предварительно очищают от мягкого налета, просушивают сжатым воздухом и смачивают препаратами, как указано выше при профилактике кариеса. В дальнейшем процедуру повторяют 1 раз в год, не изменяя способ профилактики кариеса методом глубокого фторирования.

Условия хранения и маркировка

Условия хранения

Ftorcalcit-E в упакованном виде должен храниться в закрытых прохладных помещениях, защищенных от воздействия атмосферных осадков и прямых солнечных лучей, на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов.

Маркировка

Символ  указывает рекомендуемый конечный срок использования изделия.

Символ **СР** в таблице обозначает номер свидетельства о государственной регистрации и дату его выдачи.

ЧП "Латус",

61010, г.Харьков, ул. Текстильная, 82,

Тел. +380577332697 www.latus.com.ua

