

Ftoroplen-LC™

*Лак профилактический светоотверждаемый
фторвыделяющий*

Назначение

Лак **Ftoroplen-LC** предназначен для нанесения фторвыделяющего покрытия на передние зубы с целью повышения резистентности эмали, снятия повышенной чувствительности и профилактики кариеса.

Состав и свойства

Ftoroplen-LC - представляет собой однокомпонентный лак на основе полимерного пленкообразующего, способного полимеризоваться под воздействием видимого света с длиной волны 400-500 нм. Не требует протравливания поверхности зуба. В качестве активного агента содержит фторид натрия и кальция, выделяющий ионы фтора, которые способствуют восстановлению зубной эмали и предохраняют зубы от развития кариеса. Дополнительной фотополимеризацией достигается повышенная прочность пленки.

Способ применения

Поверхность зубов очищают от налета и отложений, используя щетки, чашечки и пасту для клинической чистки. Обработанную поверхность промывают водой и сушат сжатым воздухом. Наносят 1 слой лака равномерно на всю поверхность зуба при помощи кисточки или аппликатора, сушат сжатым воздухом в течение 20-30 с. Нанесенный лак полимеризуют в течение 20 с при помощи фотополимеризатора. После отверждения дают выдержку около 1 минуты и ватным шариком удаляют с поверхности липкий слой. В течение двух часов после манипуляций не рекомендуется принимать пищу. Правильно нанесенная пленка сохраняется на поверхности зуба до 7 суток.

Рекомендации

При хранении происходит оседание фторвыделяющего агента, поэтому перед применением содержимое флакона необходимо взболтать.

Пациентам рекомендуется в целях сохранения пленки щадяще проводить гигиенические мероприятия.

По истечении рекомендованного врачом времени нахождения пленки на зубах пациенты самостоятельно убирают ее путем более интенсивной чистки зубной щеткой.

Условия хранения и маркировкаУсловия хранения

Хранить в закрытых прохладных помещениях, защищенных от попадания света и атмосферных осадков, на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов.

Маркировка

Символ  указывает рекомендуемый конечный срок использования изделия.

Символ **CP** в таблице обозначает номер свидетельства о государственной регистрации и дату его выдачи.

Ftoroplen-LC™

*Лак профілактичний світлотверднучий, що
виділяє фтор*

Призначення

Лак **Ftoroplen-LC** призначений для нанесення фторвиділяючого покриття на передні зуби з метою підвищення резистентності емалі, зняття підвищеної чутливості та профілактики карієсу.

Склад та властивості

Ftoroplen-LC - представляє собою однокомпонентний лак на основі полімерного плівкостворюючого, здатного полімеризуватися під впливом видимого світла з довжиною хвилі 400-500 нм. Не потребує протруєння поверхні зуба. У якості активного агенту містить фторид натрію та кальцію, який виділяє іони фтору, що сприяють відновленню зубної емалі та оберігають зуби від розвитку карієсу. Додатковою фотополімерізацією здобувається підвищена міцність плівки.

Спосіб застосування

Поверхню зубів очищують від нальоту та відкладень, використовуючи щітки, чашечки та пасту для клінічної чистки. Оброблену поверхню промивають водою та сушать стисненим повітрям. Наносять один шар лаку рівномірно на всю поверхню зуба за допомогою пензлика або аплікатора, сушать стисненим повітрям протягом 20 - 30 с. Нанесений лак полімеризують протягом 20 с за допомогою фотополімеризатора. Після затвердіння дають витримку приблизно 1 хвилину і ватною кулькою видаляють з поверхні липкий шар.

Протягом двох годин після маніпуляції не рекомендується приймати їжу.

Правильно нанесена плівка лаку зберігається на поверхні зуба до 7 діб.

Рекомендації

При зберіганні відбувається невелике осідання фторвиділяючого агенту, тому перед застосуванням вміст флакону необхідно збовтати.

Пацієнтам рекомендується у цілях зберігання лакової плівки обережно проводити гігієнічні процедури.

По закінченню рекомендованого лікарем часу знаходження плівки на зубах, пацієнти самостійно видаляють її шляхом більш інтенсивної чистки зубною щіткою.

Умови зберігання та маркуванняУмови зберігання

Зберігати у закритих приміщеннях, захищених від попадання світла та атмосферних опадів, на відстані не менш, як 1 м від опалювальних приладів.

Маркування

Символ  зазначає рекомендуєий кінцевий термін використання виробу.

Символ **CP** у таблиці позначає номер свідоцтва про державну реєстрацію та дату його видачі