

Инструкция по применению

FtoroplenTM

Редакция 03.2014

Лак профилактический фторвыделяющий

Назначение

Лак **Ftoroplen** предназначен для фторпрофилактики кариеса, снятия гиперчувствительности зубов, а также как фторвыделяющий материал с целью профилактики воспалительных процессов в зубах, подготовленных под протез.

Состав и свойства

Ftoroplen - однокомпонентный лак на основе биологически индифферентных полимеров. Образует пленку в результате подсушивания воздухом.

Содержит препарат фторида натрия и фторида кальция, который способствует восстановлению зубной эмали и предохраняет зубы от развития кариеса, устраняет гиперчувствительность зубов.

Способ применения

Поверхность зубов очищают от налета и отложений, используя щетки, чашечку и пасту для клинической чистки. Обработанную поверхность промывают водой и сушат струей воздуха. Наносят один слой лака равномерно на всю поверхность зуба при помощи кисточки или аппликатора, сушат сжатым воздухом в течение 1,5-2 минут. Для защиты аппроксимальных поверхностей и улучшения равномерности пленки наносят аналогично второй слой лака. Правильно нанесенная пленка лака сохраняется на поверхности зуба до 5 суток.

Рекомендации

При хранении происходит небольшое оседание фторвыделяющего

агента, поэтому перед применением содержимое флакона необходимо взболтать.

Пациенту в течение двух часов после манипуляции не рекомендуется принимать пищу.

Пациенту рекомендуется в целях сохранения лаковой пленки щадяще проводить гигиенические процедуры.

По истечении рекомендованного врачом времени нахождения пленки на зубах пациенты самостоятельно убирают ее путем более интенсивной чистки зубной щеткой.

Условия хранения и маркировка

Условия хранения

Хранить в закрытых помещениях, защищенных от попадания света и атмосферных осадков, на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов.

Маркировка

Символ  указывает рекомендуемый конечный срок использования изделия.

Символ **СР** в таблице обозначает номер свидетельства о государственной регистрации и дату его выдачи.

ЧП "Латус"

61010, г.Харьков, ул. Текстильная, 82,
Тел. +380577332697

www.latus.com.ua



Інструкція по застосуванню

Редакція 03.2014

Ftoroplen[™]

**Лак профілактичний,
що виділяє фтор**

Призначення

Лак **Ftoroplen** призначений для фторпрофілактики карієсу, зняття гіперчутливості зубів, а також як матеріал, що виділяє фтор з метою профілактики запальних процесів в зубах, які підготовлені під протез.

Склад та властивості

Ftoroplen - однокомпонентний лак на основі біологічно індиферентних полімерів. Утворює плівку в наслідок підсушування повітрям.

Містить препарат фториду натрію та фториду кальцію, який сприяє відновленню зубної емалі та оберігає зуби від розвитку карієса, усуває гіперчутливість зубів.

Спосіб застосування

Поверхню зубів очищують від нальоту та відкладень, використовуючи щітки, чашечку та пасту для клінічної чистки. Оброблену поверхню промивають водою та сушать струменем повітря. Наносять один шар лаку рівномірно на всю поверхню зуба за допомогою пензлика або аплікатора, сушать стисненим повітрям протягом 1,5-2 хвилин. Для захисту апроксимальних поверхонь та покращення рівномірності плівки, наносять аналогічно другий шар лаку.

Правильно нанесена плівка лаку зберігається на поверхні зуба до 5 діб.

Рекомендації

При зберіганні відбувається невелике осідання агенту, що виділяє фтор, тому перед застосуванням вміст флакону необхідно збовтати.

Пацієнту протягом двох годин після маніпуляції не рекомендується приймати їжу.

Пацієнту рекомендується у цілях зберігання лакової плівки обережно проводити гігієнічні процедури.

По закінченню рекомендованого лікарем часу знаходження плівки на зубах, пацієнти самостійно видаляють її шляхом більш інтенсивної чистки зубною щіткою.

Умови зберігання та маркування

Умови зберігання

Зберігати у закритих приміщеннях, захищених від попадання світла та атмосферних опадів, на відстані не менш, як 1 м від опалювальних приладів.

Маркування

Символ  зазначає рекомендуємий кінцевий термін використання виробу.

Символ **CP** в таблиці позначає номер свідоцтва про державну реєстрацію і дату його видачі.

ПП "Латус"

61010, м.Харків, вул. Текстильна 82,

Тел. +380577332697

www.latus.com.ua

